

A DKP applikáció használata Accu-Chek Instant vércukormérővel

1. Töltse le a DKP applikációt okostelefonjára (Android vagy iOS platformon); nyissa meg az alkalmazást, majd regisztráljon!
2. Kapcsolja be a Bluetooth® kapcsolatot mobiltelefonján!
3. A vércukormérő kikapcsolt állapotában, nyomja meg és tartsa nyomva a vércukormérő oldalán található alsó gombot (▼), amíg a Bluetooth® szimbólum meg nem jelenik.
4. Indítsa el a DKP alkalmazást, majd a felugró ablakban engedélyezze az Accu-Chek Instant készülékkel való szinkronizációt, és adja meg a vércukormérő hátoldalán található PIN kódot!
5. Amennyiben a párosítás sikeres volt, vércukormérője képernyőjén megjelenik az OK felirat.
6. Az Accu-Chek Instant vércukormérő által mért vércukorértékek automatikusan beolvasásra kerülnek a DKP alkalmazásba.

Webshop és bővebb információ:
www.vercukormeres.hu

Az Accu-Chek® Instant készülék gyógyászati segédeszköz. Az Accu-Chek® Connect orvostechnikai eszköz. Az Accu-Chek® Smart Pix leolvasó készülék információ technológiai eszköz.

Az Accu-Chek®, Accu-Chek® Instant, Accu-Chek® Connect és Accu-Chek® Smart Pix a Roche bejegyzett védjegyei © 2016 Roche.

A Diabétesz Kliens Program® a Roche Magyarország Kft. bejegyzett védjegye. © 2021 Roche

Ingyenesen hívható zöldszám:
06 (80) 200-694

Kövessen minket:
@accuchekek_eldazeteled

Kövessen minket:
facebook.hu/diabvitalg



Roche Magyarország Kft.
1112 Budapest, Balatoni út 2/A

ACCU-CHEK®

Instant

Roche

A még egyszerűbb vércukormérésért!

Accu-Chek Instant vércukormérő



A/ILA4/IFC/2023/01V.

A kockázatokról olvassa el
a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!


Vércukormérés egyszerűen

- Tesztcsík kidobó funkció
- 720 készüléken tárolt mérési adat
- 7, 14, 30, 90 napos átlag értékek
- Céltartomány kijelző
- Automatikus adatátvitel a DKP Applikációba Bluetooth kapcsolattal



Kényelem

Gyors és egyszerű vércukormérés: a kis vérmintát (0,6 μ L) a tesztcsík teljes szélességében, az alján található sárga részen bárhol, könnyen fel lehet vinni.

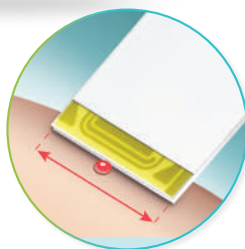

Komplex megoldás a diabétesz monitorozására a Diabétesz Kliens Program (DKP) mobilalkalmazással



- Automatikus **adatátvitel Accu-Chek Instant vércukormérőből** Bluetooth kapcsolattal
- **Vércukorérték-, inzulin- és szénhidrátbevétel** digitális naplózása
- **Napi mozgás adatok** naplózása
- Valamennyi adat **grafikonos ábrázolása**
- **7, 14, 30 és 90 napos átlag** vércukormérési eredmények megjelenítése
- **Vércukoradatok megosztása** különböző üzenetküldő alkalmazásokkal
- **Érdekes tartalmak/cikkek és receptek** cukorbetegnek, valamint egészségtudatos életmódot követők számára
- Gyógyszer, recept, szűrővizsgálat és **inzulin beadási emlékeztetők**

